

Zentrierlineal

hier falten

Checkliste Zentrierung

- Hast Du das Zentrierlineal richtig ausgedruckt?
PDF Ausdruck auf 100% einstellen. Messe die Länge nach. Das Zentrierlineal muss 100mm lang sein!



- Falte den Ausdruck an der markierten Line und mache ein Bild von Dir auf dem Du Dir das Zentrierlineal über Deine Augen hältst.



- Mache ein zweites Bild von Dir (Porträt) ohne das Zentrierlineal und ohne Brille.



- Achte darauf, dass die Größe der Bilder nicht über 3 Mbytes liegen sollte.

Wenn Du die Checkliste abgearbeitet hast, kannst Du die Bilder auf unserem Server hochladen.



Deine Zentrierdaten werden dann von unserem Augenoptik Team mit dem Lichtbändiger Zentriersystem ermittelt und Dein Bild bearbeitet.

Du erhältst eine E-Mail mit einem Link. Dort kannst Du Deinen Brillenentwurf direkt auf Deinem Porträtbild sehen, weiterbearbeiten und anschließend mit Brillenstärke bestellen.